

KB10

ÓRTESIS HUMERAL IZQUIERDA



MODO DE EMPLEO

1. Probar la talla al paciente y marcar con lápiz la línea de corte.
2. Utilizar el PU indicado en cada talla.
3. Proteger las prominencias óseas con **okm fleecyweb**.
4. Colocar el tricot de algodón **okm tub**.
5. Verter el contenido del bote 1 (etiqueta color gris, isocianato), en el bote 2 (etiqueta color azul, poliol).
6. Mezclar durante 18-20 segundos (ver tiempos de agitación), esperando a retirar el bote a que la mezcladora esté completamente parada.
7. Verter el PU en el tejido (la misma cantidad en las dos mitades), y repartirlo con el rodillo.
8. Alrededor de los 2' colocar la órtesis al paciente, verificando su correcta posición y cerrar la cremallera.
9. Atar las cintas del tejido y tirar de los extremos del mismo y de la cremallera, provocando una tensión durante 4' para evitar pliegues (procurar no situar los dedos en la zona donde hay PU, ya que esto provocaría puntos de presión en la órtesis).
10. Colocar una venda elástica sin presionar excesivamente.
11. Alrededor de los 7' cortar a la longitud deseada.
12. Dejar endurecer el PU sobre el paciente durante unos 20' antes de retirarla.
13. Es importante que una vez terminada la órtesis sea colocada de nuevo al paciente, pues el PU durante la primera hora sufre una ligera retracción.
14. Aconsejamos sustituir la cremallera por velcros y colocar velcro en la zona del antebrazo.

IMPORTANTE

- Usar protección para los ojos y las manos.
- Manipular y abrir los recipientes con prudencia.



RELACIÓN DE LA RESINA SEGÚN TALLA

TALLA	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL
PU	KR500	KR500	KR500	KR500	KR500	KR700	KR700

TIEMPO DE MEZCLA

GRAMOS	170	300	500	700	900	1100	1300
RÍGIDO	10"-12"	12"-14"	16"-18"	20"-22"	23"-25"	25"-27"	
SOFT		9"-11"	13"-15"	17"-19"	20"-22"	22"-24"	24"-26"

TIEMPO EN LA PREPARACIÓN DE LA ÓRTESIS > TOTAL 24 MINUTOS

