

KC02

CORSE DORSOLUMBAR
BIVALVA

MODO DE EMPLEO

1. Probar la talla al paciente, atar los tirantes, y marcar con lápiz la línea de corte.
2. Utilizar el PU indicado en cada talla.
3. Proteger las prominencias óseas con **okmfleecyweb**.
4. Colocar el tricot de algodón **okmtub**.
5. Aconsejamos realizar primero la parte posterior, y, una vez endurecida, la anterior.
6. Verter el contenido del bote 1 (etiqueta color gris, isocianato), en el bote 2 (etiqueta color azul, polioli).
7. Mezclar durante 18-25 segundos (ver los tiempos de agitación), esperando a retirar el bote a que la batidora esté completamente parada.
8. Verter el PU en el tejido (parte posterior), y repartirlo con el rodillo.
9. Alrededor de los 2' aplicar la ortesis al paciente, verificando su correcta posición.
10. Cerrar las dos cremalleras y atar los tirantes, y tirar de la solapa inferior del tejido provocando una tensión durante 4', para evitar posibles pliegues (procurar no situar los dedos en la zona donde hay PU, ya que esto provocaría puntos de presión en la ortesis).
11. Colocar una venda elástica haciendo ligera presión a nivel de cintura y crestas.
12. Alrededor de los 7' cortar a la longitud deseada.
13. Dejar endurecer la ortesis sobre el paciente durante unos 20' antes de retirarla (si la ortesis se está realizando con el paciente en decúbito hay que dejarla endurecer 30').
14. Para realizar la parte anterior procurar no cambiar de posición la parte posterior ya terminada, y hacer el mismo proceso que el realizado en la parte posterior.
15. Colocar las grapas y cerrar ambas cremalleras.
16. Es importante que una vez terminada la ortesis sea colocada de nuevo al paciente, pues el PU durante la primera hora sufre una ligera retracción.
17. Aconsejamos la colocación de velcros.

IMPORTANTE

- Usar protección para los ojos y las manos.
- Manipular y abrir los recipientes con prudencia.



RELACIÓN DE LA RESINA SEGÚN TALLA

TALLA	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL
PU	KR500 KR500	KR500 KR700	KR700 KR700	KR700 KR900	KR900 KR900	KR900 KR1100	KR1100 KR1100

TIEMPO DE MEZCLA

GRAMOS	170	300	500	700	900	1100	1300
RÍGIDO	10"-12"	12"-14"	16"-18"	20"-22"	23"-25"	25"-27"	
SOFT		9"-11"	13"-15"	17"-19"	20"-22"	22"-24"	24"-26"

TIEMPO EN LA PREPARACIÓN DE LA ÓRTESIS > TOTAL 24 MINUTOS

