


KC06 MINERVA CON TRONCO

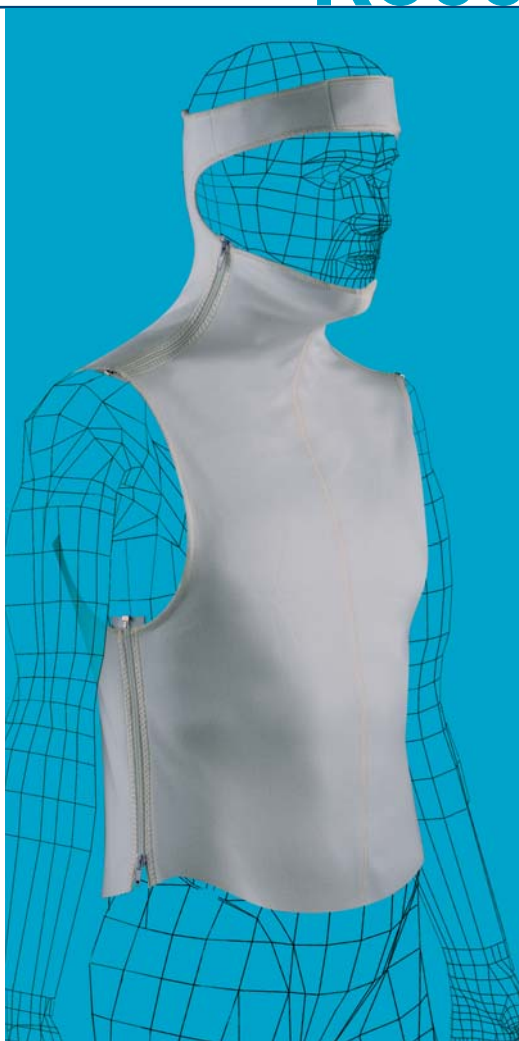

MODO DE EMPLEO

1. Probar la talla al paciente, cerrar cremalleras, y marcar con lápiz la línea de corte.
2. Utilizar el PU indicado en cada talla.
3. Proteger las prominencias óseas, especialmente la glotis, la mandíbula y las clavículas con **okmfleecyweb**.
4. Colocar el tricot de algodón (dejando libres las zonas de ojos y boca) **okmtub**.
5. Aconsejamos realizar primero la parte anterior, y, una vez endurecida, la posterior.
6. Verter el contenido del bote 1 (etiqueta color gris, isocianato), en el bote 2 (etiqueta color azul, polioli).
7. Mezclar durante 18-23 segundos (ver los tiempos de agitación), esperando a retirar el bote a que la batidora esté completamente parada.
8. Verter el PU en el tejido (parte anterior), y repartirlo con el rodillo colocando la parte interna hacia abajo.
9. Alrededor de los 2' aplicar la órtesis al paciente, verificando su correcta posición.
10. Cerrar las cuatro cremalleras y atar los tirantes.
11. Tirar de la solapa superior del tejido y de los extremos de las cremalleras provocando una tensión durante 4', para evitar posibles pliegues (procurar no situar los dedos en la zona donde hay PU, ya que esto provocaría puntos de presión en la ortesis).
12. Alrededor de los 7' cortar a la longitud deseada.
13. Colocar las grapas y cerrar las cremalleras.
14. Dejar endurecer la ortesis sobre el paciente durante unos 20' antes de retirarla.
15. Para realizar la parte posterior procurar no cambiar de posición la parte anterior ya terminada, y hacer el mismo proceso que el realizado en la parte anterior.
16. Es importante que una vez terminada la ortesis sea colocada de nuevo al paciente, pues el PU durante la primera hora sufre una ligera retracción.

IMPORTANTE

- Usar protección para los ojos y manos.
- Manipular y abrir los recipientes con prudencia.



RELACIÓN DE LA RESINA SEGÚN TALLA

TALLA	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL
PU	KR500 KR500	KR500 KR500	KR500 KR500	KR700 KR700	KR900 KR900	KR900 KR900	KR900 KR900

TIEMPO DE MEZCLA

GRAMOS	170	300	500	700	900	1100	1300
RÍGIDO	10"-12"	12"-14"	16"-18"	20"-22"	23"-25"	25"-27"	
SOFT		9"-11"	13"-15"	17"-19"	20"-22"	22"-24"	24"-26"

TIEMPO EN LA PREPARACIÓN DE LA ÓRTESIS > TOTAL 24 MINUTOS

