


KC07

CORSÉ DORSOLUMBAR ELÁSTICO

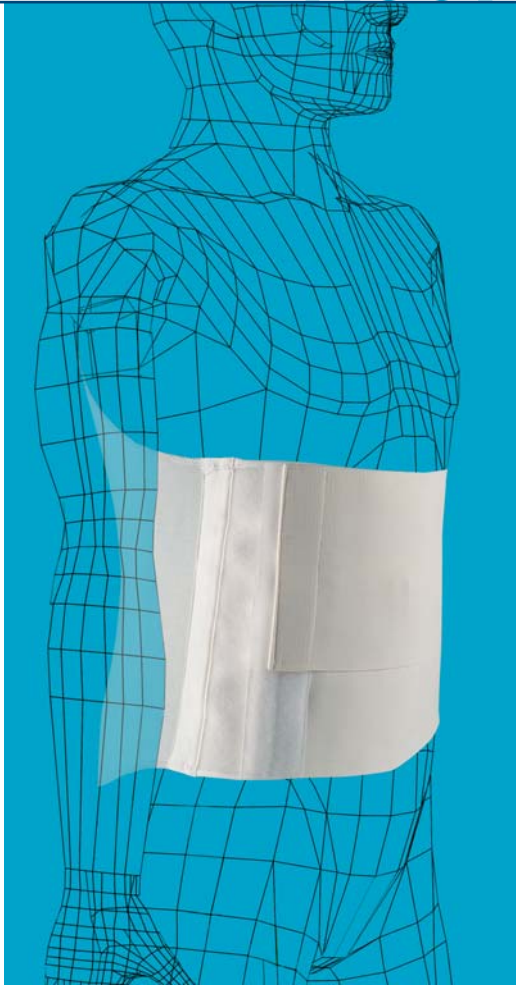

MODO DE EMPLEO

1. Probar la talla al paciente, atar los tirantes de ambos lados, marcar con lápiz la línea de corte y retirar dejando atados los tirantes.
2. Utilizar el PU indicado en cada talla.
3. Proteger las prominencias óseas con **okmfleecyweb**.
4. Colocar el tricót de algodón **okmtub**.
5. Verter el contenido del bote 1 (etiqueta color gris - isocianato) en el bote 2 (etiqueta color azul - polioli).
6. Mezclar durante 18-23 segundos (ver los tiempos de agitación), esperando a retirar el bote hasta que la mezcladora esté completamente parada.
7. Verter el PU en el tejido, a continuación colocar la parte interna hacia abajo y repartirlo con el rodillo.
8. Alrededor de los 2' aplicar la ortesis al paciente, cerramos la solapa central del velcro sin apretar demasiado, verificando su correcta posición.
9. Tiramos del tejido por la solapa de la parte posterior, provocando una tensión durante 4', para evitar pliegues (procurar no situar los dedos en las zonas donde hay PU, ya que esto provocaría puntos de presión en la ortesis).
10. Colocar una venda elástica haciendo una ligera presión a nivel de la cintura y crestas.
11. Alrededor de los 7' cortar a la longitud deseada.
12. Dejar endurecer la ortesis sobre el paciente unos 20' antes de retirarla.
13. Es importante que una vez terminada la ortesis sea colocada de nuevo al paciente, pues el PU durante la primera hora sufre una ligera retracción

IMPORTANTE

- Usar protección para los ojos y las manos.
- Manipular y abrir los recipientes con prudencia.



RELACIÓN DE LA RESINA SEGÚN TALLA

| TALLA | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| PU | KR170 KRS500 | KR170 KRS500 | KR300 KRS700 | KR300 KRS700 | KR300 KRS900 | KR300 KRS900 | KR500 KRS1100 |

TIEMPO DE MEZCLA

| GRAMOS | 170 | 300 | 500 | 700 | 900 | 1100 | 1300 |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| RÍGIDO | 10"-12" | 12"-14" | 16"-18" | 20"-22" | 23"-25" | 25"-27" | |
| SOFT | | 9"-11" | 13"-15" | 17"-19" | 20"-22" | 22"-24" | 24"-26" |

TIEMPO EN LA PREPARACIÓN DE LA ÓRTESIS > TOTAL 24 MINUTOS

