

KP01

ÓRTESIS DE RODILLA CON VELCRO



MODO DE EMPLEO

1. Probar la talla al paciente y marcar con lápiz la línea de corte.
2. Utilizar el PU indicado en cada talla.
3. Proteger las prominencias óseas con **okmfleecyweb**.
4. Colocar el tricot de algodón **okmtub**.
5. Verter el contenido del bote 1 (etiqueta color gris - isocianato) en el bote 2 (etiqueta color azul - polioli).
6. Mezclar durante 18-23 segundos (ver los tiempos de agitación), esperando a retirar el bote hasta que la mezcladora esté completamente parada.
7. Verter el PU en el tejido colocando la parte interna hacia abajo y repartirlo con el rodillo.
8. Alrededor de los 2' colocar la ortesis al paciente, verificando su correcta posición y cerrar la solapa central del velcro sin apretar demasiado.
9. Atar las cintas del tejido y tirar de los extremos del mismo provocando una tensión durante 4', para evitar pliegues (procurar no situar los dedos en las zonas donde hay PU, ya que esto provocaría puntos de presión en la ortesis).
10. Alrededor de los 7' cortar a la longitud deseada.
11. Cerrar las cinchas de velcro.
12. Dejar endurecer la ortesis sobre el paciente unos 20' antes de quitarla.
13. Es importante que una vez terminada la ortesis sea colocada de nuevo al paciente, pues el PU durante la primera hora sufre una ligera retracción.

IMPORTANTE

- Usar protección para los ojos y las manos.
- Manipular y abrir los recipientes con prudencia.



n° 1696.01



RELACIÓN DE LA RESINA SEGÚN TALLA

TALLA	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL
PU	KR500	KR500	KR500	KR700	KR700	KR900	KR900

TIEMPO DE MEZCLA

GRAMOS	170	300	500	700	900	1100	1300
RÍGIDO	10"-12"	12"-14"	16"-18"	20"-22"	23"-25"	25"-27"	
SOFT		9"-11"	13"-15"	17"-19"	20"-22"	22"-24"	24"-26"

TIEMPO EN LA PREPARACIÓN DE LA ÓRTESIS > TOTAL 24 MINUTOS

