

KP02

ÓRTESIS DE RODILLA (dos cremallera)



MODO DE EMPLEO

1. Probar la talla al paciente y marcar con lápiz en la zona inguinal la longitud deseada.
2. Realizar pliegue en el tejido de unos 5 cm. por su parte inferior (colocando esparadrapo).
3. Utilizar el PU indicado en cada talla.
4. Proteger las prominencias óseas, especialmente cabeza peroné y maleolos con **okmfleecyweb**.
5. Colocar el tricot de algodón **okmtub**.
6. Se aconseja realizar la ortesis de una sola vez (aunque conste de dos partes).
7. Verter el contenido del bote 1 (etiqueta color gris - isocianato) en el bote 2 (etiqueta color azul - polioli).
8. Mezclar durante 20-25 segundos (ver los tiempos de agitación), esperando a retirar el bote hasta que la mezcladora esté completamente parada.
9. Verter el PU en el tejido (la misma cantidad en las dos mitades), retirar el esparadrapo. Repartir el PU con el rodillo.
10. Cerrar la cremallera de la parte interna antes de colocar la prenda.
11. Alrededor de los 2' colocar la ortesis al paciente, verificando su correcta posición y cerrar la otra cremallera.
12. Atar las cintas del tejido y tirar de los extremos del mismo y de las cremalleras, provocando una tensión durante 4', para evitar pliegues (procurar no situar los dedos en las zonas donde hay PU, ya que esto provocaría puntos de presión en la ortesis).
13. Alrededor de los 7' cortar a la longitud deseada.
14. Colocar las grapas de las cremalleras y cerrarlas.
15. Dejar endurecer la ortesis sobre el paciente unos 20' antes de quitarla.
16. Es importante que una vez terminada la ortesis sea colocada de nuevo al paciente, pues el PU durante la primera hora sufre una ligera retracción.

IMPORTANTE

- Usar protección para los ojos y las manos.
- Manipular y abrir los recipientes con prudencia.



RELACIÓN DE LA RESINA SEGÚN TALLA

TALLA	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL
PU	KR700	KR700	KR900	KR900	KR1100	KR1100	KR1100

TIEMPO DE MEZCLA

GRAMOS	170	300	500	700	900	1100	1300
RÍGIDO	10"-12"	12"-14"	16"-18"	20"-22"	23"-25"	25"-27"	
SOFT		9"-11"	13"-15"	17"-19"	20"-22"	22"-24"	24"-26"

TIEMPO EN LA PREPARACIÓN DE LA ÓRTESIS > TOTAL 24 MINUTOS

