

KP05 ÓRTESSIS DE PIERNA Y PIE



MODO DE EMPLEO

1. Probar la talla al paciente y marcar con lápiz la línea de corte.
2. Utilizar el PU indicado en cada talla.
3. Proteger las prominencias óseas, especialmente cabeza de peroné, maleolos y empeine con **okm fleecyweb**.
4. Colocar el tricot de algodón **okm tub**.
5. Probar la talla del soporte plantar.
6. Se aconseja realizar la órtesis de una sola vez, aunque conste de dos partes.
7. Verter el contenido del bote 1 (etiqueta color gris - isocianato) en el bote 2 (etiqueta color azul - polioli).
8. Mezclar durante 20-25 segundos (ver los tiempos de agitación), esperando a retirar el bote hasta que la mezcladora esté completamente parada.
9. Verter el PU en el tejido en la proporción 2/1, colocando la parte interna hacia abajo, y repartirlo con el rodillo.
10. Cerrar la cremallera de la parte interna antes de colocar la prenda.
11. Alrededor de los 2' colocar la órtesis al paciente, verificando su correcta posición y cerrar la otra cremallera.
12. El paciente tiene que presionar sobre la planta del pie para que se adapte al soporte plantar.
13. Tirar de los extremos de las cremalleras y del tejido provocando una tensión durante 4', para evitar pliegues (procurar no situar los dedos en las zonas donde hay PU, ya que esto provocaría puntos de presión en la órtesis).
14. Alrededor de los 7' cortar a la longitud deseada.
15. Colocar las grapas de las cremalleras y cerrarlas.
16. Dejar endurecer la órtesis sobre el paciente unos 20' antes de quitarla.
17. Es importante que una vez terminada la órtesis sea colocada de nuevo al paciente, pues el PU durante la primera hora sufre una ligera retracción.
18. Esta órtesis se suele colocar con un soporte plantar.

IMPORTANTE

- Usar protección para los ojos y las manos.
- Manipular y abrir los recipientes con prudencia.



RELACIÓN DE LA RESINA SEGÚN TALLA

TALLA	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL
PU	KR700	KR700	KR700	KR900	KR900	KR1100	KR1100

TIEMPO DE MEZCLA

GRAMOS	170	300	500	700	900	1100	1300
RÍGIDO	10"-12"	12"-14"	16"-18"	20"-22"	23"-25"	25"-27"	
SOFT		9"-11"	13"-15"	17"-19"	20"-22"	22"-24"	24"-26"

TIEMPO EN LA PREPARACIÓN DE LA ÓRTESSIS > TOTAL 24 MINUTOS

