


KP06

ÓRTESIS P.T.B.

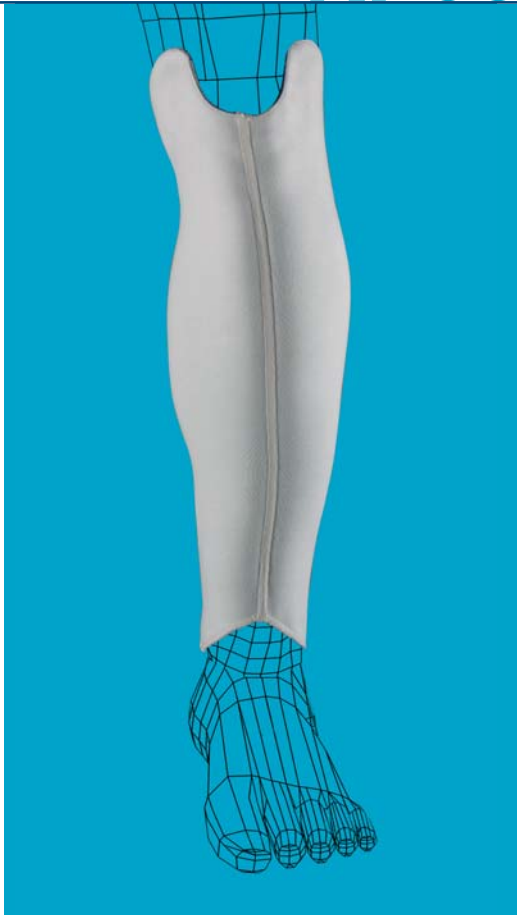

MODO DE EMPLEO

1. Probar la talla al paciente y marcar con lápiz la línea de corte.
2. Utilizar el PU indicado en cada talla.
3. Proteger las prominencias óseas, especialmente cabeza peroné y maleolos con **okm fleecyweb**.
4. Colocar el tricót de algodón **okm tub**.
5. Verter el contenido del bote 1 (etiqueta color gris - isocianato) en el bote 2 (etiqueta color azul - poliol).
6. Mezclar durante 14-20 segundos (ver los tiempos de agitación), esperando a retirar el bote hasta que la mezcladora esté completamente parada.
7. Verter el PU en el tejido (la misma cantidad en las dos mitades) y repartir el PU con el rodillo.
8. Alrededor de los 2' colocar la ortesis al paciente, verificando su correcta posición y cerrar la cremallera.
9. Atar las cintas del tejido y tirar de los extremos del mismo y de la cremallera, provocando una tensión durante 4', para evitar pliegues (procurar no situar los dedos en las zonas donde hay PU, ya que esto provocaría puntos de presión en la ortesis).
10. Alrededor de los 7' cortar a la longitud deseada.
11. Colocar las grapas de la cremallera y cerrarla.
12. Dejar endurecer la ortesis sobre el paciente unos 20' antes de quitarla.
13. Es importante que una vez terminada la ortesis sea colocada de nuevo al paciente, pues el PU durante la primera hora sufre una ligera retracción.
14. No se puede colocar la cazoleta hasta que el PU haya endurecido.
15. Aconsejamos colocación de velcros.

IMPORTANTE

- Usar protección para los ojos y las manos.
- Manipular y abrir los recipientes con prudencia.



RELACIÓN DE LA RESINA SEGÚN TALLA

TALLA	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL
PU	KR300	KR300	KR500	KR500	KR500	KR700	KR700

TIEMPO DE MEZCLA

GRAMOS	170	300	500	700	900	1100	1300
RÍGIDO	10"-12"	12"-14"	16"-18"	20"-22"	23"-25"	25"-27"	
SOFT		9"-11"	13"-15"	17"-19"	20"-22"	22"-24"	24"-26"

TIEMPO EN LA PREPARACIÓN DE LA ÓRTESIS > TOTAL 24 MINUTOS

