

KP07

ÓRTESIS Q.T.B.



MODO DE EMPLEO

1. Probar la talla al paciente y marcar con lápiz la línea de corte.
2. Utilizar el PU indicado en cada talla
3. Proteger las prominencias óseas, especialmente cabeza de peroné y maleolos con **okm fleecyweb**.
4. Colocar el tricot de algodón **okm tub**.
5. Aconsejamos realizar la órtesis por separado (primero la inferior).
6. Verter el contenido del bote 1 (etiqueta color gris - isocianato) en el bote 2 (etiqueta color azul - poliol).
7. Mezclar durante 14-18 segundos (ver los tiempos de agitación), esperando a retirar el bote hasta que la mezcladora esté completamente parada.
8. Verter el PU en el tejido, colocando la parte interna hacia abajo, y repartirlo con el rodillo.
9. Alrededor de los 2' aplicar la órtesis al paciente, verificando su correcta posición.
10. Atar las cintas del tejido y tirar de los extremos del mismo y de la cremallera provocando una tensión durante 4', para evitar pliegues (procurar no situar los dedos en las zonas donde hay PU, ya que esto provocaría puntos de presión en la órtesis).
11. Alrededor de los 7' cortar a la longitud deseada.
12. Colocar las grapas de la cremallera y cerrarla.
13. Dejar endurecer la órtesis sobre el paciente unos 20' antes de quitarla.
14. Es importante que una vez terminada la órtesis sea colocada de nuevo al paciente, pues el PU durante la primera hora sufre una ligera retracción.
15. Seguir el mismo proceso para realizar la parte superior.
16. No colocar la articulación hasta que el PU no esté completamente endurecido.
17. Aconsejamos colocación de velcros..

IMPORTANTE

- Usar protección para los ojos y las manos.
- Manipular y abrir los recipientes con prudencia.



RELACIÓN DE LA RESINA SEGÚN TALLA

TALLA	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL
PU	KR300 KR300	KR300 KR300	KR500 KR500	KR500 KR500	KR500 KR500	KR500 KR500	KR500 KR500

TIEMPO DE MEZCLA

GRAMOS	170	300	500	700	900	1100	1300
RÍGIDO	10"-12"	12"-14"	16"-18"	20"-22"	23"-25"	25"-27"	
SOFT		9"-11"	13"-15"	17"-19"	20"-22"	22"-24"	24"-26"

TIEMPO EN LA PREPARACIÓN DE LA ÓRTESIS > TOTAL 24 MINUTOS

