

KP08

ÓRTESIS PERLVIFEMORAL



MODO DE EMPLEO

1. Probar la talla al paciente y marcar con lápiz la línea de corte.
2. Utilizar el PU indicado en cada talla.
3. Proteger las prominencias óseas con **okm fleecyweb**.
4. Colocar el tricot de algodón **okm tub**.
5. Aconsejamos primero realizar la parte anterior, y una vez finalizada y colocada en el paciente, la posterior.
6. Verter el contenido del bote 1 (etiqueta color gris - isocianato) en el bote 2 (etiqueta color azul - polioliol).
7. Mezclar durante 23-25 segundos (ver los tiempos de agitación), esperando a retirar el bote hasta que la mezcladora esté completamente parada.
8. Verter el PU en el tejido, y repartirlo con el rodillo.
9. Alrededor de los 2' colocar la ortesis al paciente, verificando su correcta posición, y cerrar las cremalleras.
10. Tirar de los extremos de las cremalleras y del tejido provocando una tensión durante 4', para evitar pliegues (procurar no situar los dedos en las zonas donde hay PU, ya que esto provocaría puntos de presión en la ortesis).
11. Alrededor de los 7' cortar a la longitud deseada.
12. Colocar las grapas de las cremalleras y cerrarlas.
13. Dejar endurecer la ortesis sobre el paciente unos 20' antes de quitarla.
14. Es importante que una vez terminada la ortesis sea colocada de nuevo al paciente, pues el PU durante la primera hora sufre una ligera retracción.
15. Repetir la misma operación con la parte posterior.

IMPORTANTE

- Usar protección para los ojos y las manos.
- Manipular y abrir los recipientes con prudencia.



RELACIÓN DE LA RESINA SEGÚN TALLA

TALLA	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL
PU	KR900	KR900	KR900	KR1100	KR1100	KR1100	KR1100

TIEMPO DE MEZCLA

GRAMOS	170	300	500	700	900	1100	1300
RÍGIDO	10"-12"	12"-14"	16"-18"	20"-22"	23"-25"	25"-27"	
SOFT		9"-11"	13"-15"	17"-19"	20"-22"	22"-24"	24"-26"

TIEMPO EN LA PREPARACIÓN DE LA ÓRTESIS > TOTAL 24 MINUTOS

